



## دستورالعمل ضدعفونی لارنگوسکوپ

لارنگوسکوپ ها از دو قسمت تشکیل شده اند:

۱- تیغه (Blade)

۲- دسته (Handle)

برای ضدعفونی تیغه به روش زیر عمل کنید:

۱- بلافاصله لارنگوسکوپ را پس از استفاده ، با آب سرد آبکشی شده تا ذرات درشت بافتی قابل رویت پاک گردد.

۲- لارنگوسکوپ را در محلول پاک کننده آنزیماتیک (آب و دترجنت) حداقل برای مدت ۲ دقیقه غوطه ور گردد.

۳- لارنگوسکوپ را بیرون آورده و به طور کامل آبکشی کنید.

۴- لارنگوسکوپ را با استفاده از گاز تمیز خشک کنید.

۵- لارنگوسکوپ را در محلول ضدعفونی سطح بالا ، (اسپورسیدین ) غوطه ور کنید.

۶- لارنگوسکوپ را بعد از ۱۰ دقیقه بیرون آورده و به طور کامل آبکشی کنید.

۷- با استفاده از گاز استریل تمام قسمت های لارنگوسکوپ را خشک کنید.

۸- لارنگوسکوپ را در دیش درب دار قرار دهید .

برای ضدعفونی دسته به روش زیر عمل کنید:

دسته لارنگوسکوپ با محلول ضدعفونی سطح متوسط به صورت اسپری ضدعفونی می گردد.(اسپری سپتی توربو)